

Bijsluiter met gebruikersinformatie.



Oorspray

oortpijn

Ter verlichting van plaatselijke oortpijn

Oordruppels op basis van olijfolie



Medisch hulpmiddel

Lees deze gebruiksaanwijzing helemaal door voordat u dit medische hulpmiddel gebruikt. GOOI DEZE GEBRUIKSAANWIJZING NIET WEG, het bevat belangrijke informatie. Wanneer u vragen heeft over dit product, stel deze aan uw arts of neem contact op met de fabrikant.

A.Vogel Oorspray op basis van olijfolie

Cerumen, of 'oorsmeer', is een van nature voorkomende stof die de uitwendige gehoorgang reinigt, beschermt en smeert. Normaal wordt dit oorsmeer verwijderd uit het oor door een zelfreinigend mechanisme. In sommige gevallen kan het oorsmeer zich echter ophopen en daardoor ongewenste effecten veroorzaken, waaronder pijn, gehoorverlies, jeuk, gevoel van volheid en hoesten. A.Vogel Oorspray is een medisch hulpmiddel met een spraykop voor handige en doeltreffende toediening. Het belangrijkste ingrediënt in A.Vogel Oorspray is olijfolie, samen met andere oliën en olieachtige plantenextracten.

Gebruiken bij

A.Vogel Oorspray voor het verwijderen van oorsmeer en/of voor het onderhouden van goede oorhygiëne en/of ter verlichting van plaatselijke oortpijn.

A.Vogel Oorspray verzacht het oorsmeer en smeert de buitenste gehoorgang en helpt zo bij de natuurlijke verwijdering van oorsmeer uit de gehoorgang. A.Vogel Oorspray bedekt bovendien de gehoorgang met een olieachtige laag, die beschermt tegen vuil en verontreinigingen van buitenaf. Samen helpt dit bij het verlichten van oortpijn.

Geschikt voor kinderen van vijf jaar en ouder. Vanwege het ontbreken van specifiek klinisch bewijs bij jongere kinderen, wordt het gebruik van A.Vogel Oorspray bij kinderen jonger dan vijf jaar alleen aangeraden op en volgens het advies van een arts of apotheker. Het gebruik van A.Vogel Oorspray gedurende meer dan 30 dagen is beperkt tot de situatie wanneer er sprake is van overmatige aanmaak van oorsmeer en/of wanneer het zelfreinigend mechanisme van het oor niet toereikend is.

Dosering en gebruik

Voor het verwijderen van oorsmeer: 1 spray per dag in elk oor. Herhaal zo vaak als nodig is. De aanbevolen dosering niet overschrijden. Voor gebruik gedurende een periode langer dan 30 dagen, raadpleeg de Gebruiken-bij-sectie in de bijsluiter.

Voor verlichting van oortpijn: Breng 3 keer per dag 1 tot 2 korte verstuivingen aan in elk oor. Herhaal dit gedurende 5 tot 7 dagen, of totdat een verbetering van de symptomen wordt geveld (maar niet langer dan 7 dagen). De aanbevolen dosering niet overschrijden.


Voor het eerste gebruik wordt geadviseerd om 1-2 korte sprays in de gootsteen te spuiten om de sproeikop te controleren.



1. Schud het flesje.

2. Buig het spuitmondstuk recht en steek de spuitmondtip ongeveer 0,5 cm in de gehoorgang. Duw de spuitmondtip niet verder in het oor.

3. Spray 1-2x kort (een spray duurt ongeveer één seconde) in het oor.

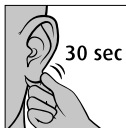

4. Wacht een halve minuut en plaats een klein wattenpropje in het oor.

5. Na het sprayen kunt u uw hoofd zijkantelen om de vloeistof sneller in het oor te laten komen.



6. Buig het spuitmondstuk na gebruik terug.

7. Voor een goede hygiëne dient de sproeikop na ieder gebruik te worden gereinigd met een vochtige doek of met heet water.

Let op:

Het gebruik van het product bij kinderen wordt alleen gedaan door en onder toezicht van een volwassene.

Bij gebruik voor het verwijderen van overtollig oorsmeer: na gebruik van het product gedurende meer dan 2 maanden moet een arts worden geraadpleegd om de toestand en de hoeveelheid van het oorsmeer die nog in het oor aanwezig is te laten beoordelen.

Bij gebruik ter verlichting van oortpijn: indien er na 3 dagen behandeling geen verbetering optreedt van de symptomen, raadpleeg dan uw arts.

Wat u moet weten voordat u dit middel gebruikt

Aanbevolen voor gebruik als onderdeel van een normale oorderhoudsroutine in geval van overmatig oorsmeer en/of oorpijn. Geschikt voor kinderen van vijf jaar en ouder. Vanwege het ontbreken van specifiek klinisch bewijs bij jongere kinderen, wordt het gebruik van A.Vogel Oorspray bij kinderen jonger dan vijf jaar alleen aanbevolen op en volgens het advies van een arts of apotheker. Het gebruik van A.Vogel Oorspray gedurende meer dan 30 dagen is beperkt tot de situatie wanneer er sprake is van overmatige aanmaak van oorsmeer en/of wanneer het zelfreinigend mechanisme van het oor niet toereikend is.

Niet gebruiken bij

Gebruik A.Vogel Oorspray niet als u gevoelig bent voor een van de ingrediënten.

Gebruik het product niet bij een beschadigd trommelvlies, bij secreties of een bloeding uit het buitenoer, bij ooreczem, of tijdens de zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Waarschuwingen

Alleen voor uitwendig gebruik, voor toepassing in het oor. Bij gebruik in combinatie met andere producten, raadpleeg dan eerst een arts of apotheker.

Niet innemen

Als het product per ongeluk is ingeslikt, ga dan naar een spoedeisende hulp en neem de verpakking van het product mee. Geen braken opwekken, tenzij dit op specifiek advies van een arts wel moet.

Vermijd contact met de ogen, slijmvliezen of open (huid)weefsel. In geval van oogcontact, was uw ogen met stromend water gedurende enkele minuten. Zoek indien nodig medische hulp.

Bijwerkingen

Naast het gewenste effect, kunnen tijdens het gebruik van A.Vogel Oorspray bijwerkingen optreden, zoals milde lokale irritatie van de huid. Deze effecten verdwijnen over het algemeen snel wanneer u eenmaal gewend bent aan het product. Als de gevoeligheid van de huid aanhoudt, stop dan de behandeling en vraag medisch advies.

Bijwerkingen die speciale aandacht vereisen

In geval van ernstige irritatie, huiduitslag of ontsteking, afscheiding of bloeding, die niet aanwezig waren vóór gebruik van het product (deze treden slechts in zeldzame gevallen op): stop met het gebruik van het product en vraag medisch advies. Als u een bijwerking ervaart die niet in deze bijsluiting staat, of als u een verandering in uw algemeen welzijn ervaart, stop dan met het gebruik van het product en raadpleeg uw arts.

Ingrediënten

Olijfolie, olijfolie-extracten van *Verbascum thapsus* flores, *Calendula officinalis* flores en *Hypericum perforatum* herba, lavendelolie, vitamine E (in zonnebloemolie), *Rosmarinus officinalis* folium extract (in plantaardige olie), knoflookolie.

Bewaren

Bewaar op een koele en droge plaats (beneden 25 °C), niet in direct zonlicht. Niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Bewaar het product in de originele verpakking. Sluit de verpakking na elk gebruik.

Niet gebruiken na de vervaldatum.

Na opening kan het product nog 3 maanden worden gebruikt, maar niet na de vervaldatum.

Verpakking

Het flesje bevat 7 ml vloeistof, goed voor ongeveer 70 sprays. Een spray bevat 0,1 ml vloeistof.



A.Vogel Oorspray is een medisch hulpmiddel.

Fabrikant: Tree of Life Pharma Ltd.,


1 Bat-Sheva Street, POB 799, Lod 7110604, Israël.


EC-REP Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese gemeenschap: MedNet EC-REP GmbH, Borkstrasse 10, 48163, Münster, Duitsland.

Distributeur: A.Vogel B.V., J.P. Broekhovenstraat 16, 8081 HC Elburg, Nederland

 Fabrikant

 CE-0477 CE-symbool met notifiedbodynummer

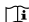
 Gebruiksaanwijzing lezen

 Gebruiksaanwijzing lezen (met betrekking tot waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen)

 Lotnummer

 Te gebruiken tot (vervaldatum)

 Temperatuurgrenzen voor bewaring

 Niet in direct zonlicht bewaren

 Medisch hulpmiddel

De tekst van deze gebruiksaanwijzing werd voor het laatst gewijzigd in april 2023.

A.Vogel